



Guida rapida Ventilazione meccanica domiciliare non invasiva



1



LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE DI ISTRUZIONI.

2




COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA, QUINDI ACCENDERE L'APPARECCHIATURA SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL MANUALE E FORNITE DAL TECNICO DI VITALAIRE.

3




SPEGNERE IL DISPOSITIVO QUANDO NON VIENE UTILIZZATO.

4

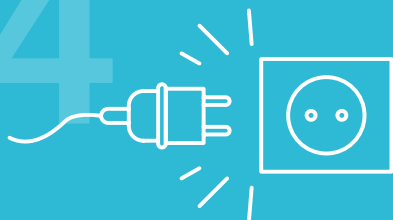

CONTROLLARE CHE L'APPARECCHIATURA SIA CORRETTAMENTE COLLEGATA ALLA RETE ELETTRICA E POSIZIONARE IL CAVO EVITANDO CHE SI DISCONNETTA ACCIDENTALMENTE.

5

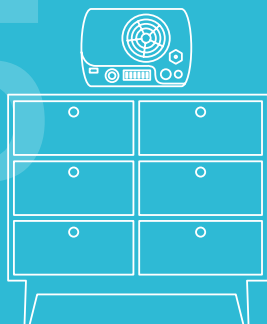


POSIZIONARE L'APPARECCHIATURA SU UNA SUPERFICIE SOLIDA E PIANA PER EVITARE CHE POSSA CADERE ACCIDENTALMENTE. NON COPRIRLA MAI CON INDUMENTI O ALTRO.

6



NEL CASO DI SPOSTAMENTI DEL VENTILATORE AL DI FUORI DELL'ABITAZIONE, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI.


7

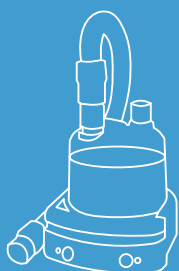

SE PRESENTE UN SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE RISCALDATO:


1. CONTROLLARE CHE NON ENTRI ACQUA NELL'APPARECCHIATURA DURANTE MOVIMENTAZIONI
2. ACCERTARSI CHE VENGA SEMPRE POSTO PIÙ IN BASSO RISPETTO AL VENTILATORE E AL PAZIENTE.

8

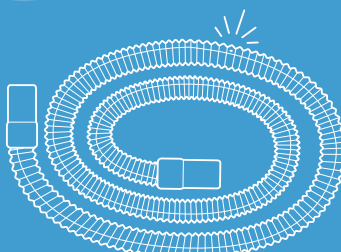

CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE INDESIDERATE NEL CIRCUITO RESPIRATORIO.

9

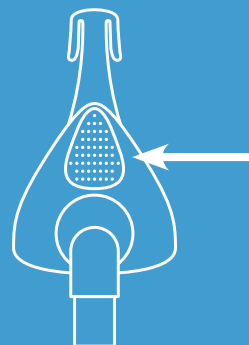

NON OCCLUDERE MAI LE PERDITE VOLONTARIE POSIZIONATE NELLA MASCHERA.




**NON MODIFICARE LE
IMPOSTAZIONI PRESCRITTE
DAL MEDICO**


**UTILIZZARE SOLO GLI
ACCESSORI PRESCRITTI DAL
MEDICO.**



**VERIFICARE PERIODICAMENTE
LE CONDIZIONI DELLE BATTERIE
INTERNE E/O ESTERNE PER
GARANTIRE IL CORRETTO
FUNZIONAMENTO IN CASO
DI INTERRUZIONE DELLA
CORRENTE.**

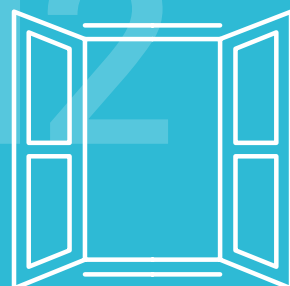


**NEL CASO SIA PRESCRITTA
ANCHE L'OSSIGENOTERAPIA,
ATTENERSI ALLE PROCEDURE E,
PER PRECAUZIONE, ARIEGGIARE
LA STANZA PER EVITARE LA
SOVRAOSSIGENAZIONE.**

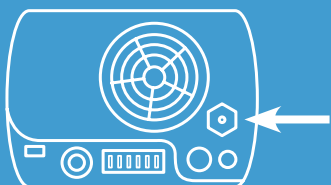


**NEL CASO DI OSSIGENO IN
INGRESSO AL VENTILATORE,
ACCERTARSI CHE NON SIA
UMIDIFICATO**



**VITALAIRE ASSICURERÀ
LA REVISIONE
DELL'APPARECCHIATURA
DA PARTE DI PERSONALE
QUALIFICATO, GARANTENDONE
IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.**

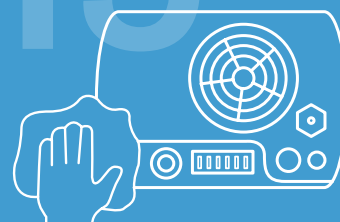

**PER LA PULIZIA ESTERNA
DEL VENTILATORE UTILIZZARE
PANNO UMIDO E DETERGENTE
DELICATO. NON UTILIZZARE
MAI PRODOTTI ABRASIVI**

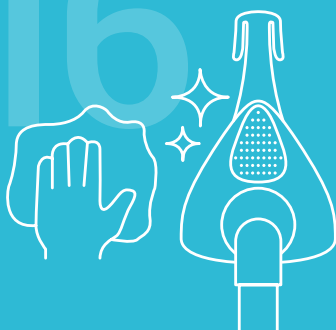

**PER PULIRE
LA MASCHERA
UTILIZZARE ACQUA
E SAPONE NEUTRO.**



**NON CERCARE MAI DI
RISOLVERE UN GUASTO
SENZA L'INDICAZIONE
ESPLICITA DELL'ADDETTO
DELL'ASSISTENZA.**



**VITALAIRE GARANTISCE UN
SERVIZIO DI ASSISTENZA
DISPONIBILE 24 ORE SU 24,
TUTTI I GIORNI INCLUSI I
FESTIVI AL NUMERO VERDE**

**Numero Verde
800-863062**



Ventiloterapia | Ossigenoterapia | Apnee del sonno
Cure Domiciliari | Telemedicina | Comunicatori oculari

* Cambiare l'assistenza. Insieme a voi.

Contatti

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
Tel. +39 024021.1 - Fax +39 024021.806



Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d'igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall'ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.