



Guida rapida Ventilazione meccanica domiciliare invasiva



1



LEGGERE CON ATTENZIONE IL MANUALE DI ISTRUZIONI.

2




COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA, QUINDI ACCENDERE L'APPARECCHIATURA SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL MANUALE E FORNITE DAL TECNICO DI VITALAIRE.

3



NON MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI PRESCRITTE DAL MEDICO.


4

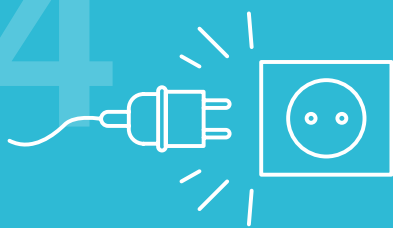

CONTROLLARE CHE L'APPARECCHIATURA SIA CORRETTAMENTE COLLEGATA ALLA RETE ELETTRICA E POSIZIONARE IL CAVO EVITANDO CHE SI DISCONNETTA ACCIDENTALMENTE.



5

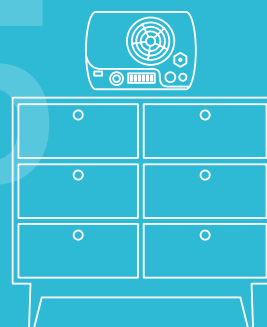

POSIZIONARE L'APPARECCHIATURA SU UNA SUPERFICIE SOLIDA E PIANA PER EVITARE CHE POSSA CADERE ACCIDENTALMENTE. NON COPRIRLA MAI CON INDUMENTI O ALTRO.

6



NEL CASO DI SPOSTAMENTI DEL VENTILATORE AL DI FUORI DELL'ABITAZIONE, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI.


7

SE PRESENTE UN SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE RISCALDATO:

1. CONTROLLARE CHE NON ENTRI ACQUA NELL'APPARECCHIATURA DURANTE LA MANIPOLAZIONE DEL CIRCUITO PAZIENTE E DELL'UMIDIFICATORE;
2. ACCERTARSI CHE VENGA SEMPRE POSTO PIÙ IN BASSO RISPETTO AL VENTILATORE E AL PAZIENTE.




8

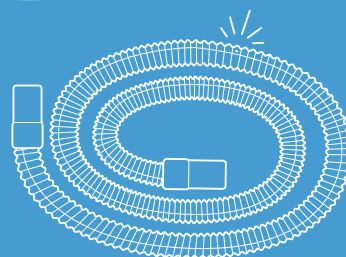


CONTROLLARE CHE NON VI SIANO PERDITE INDESIDERATE NEL CIRCUITO RESPIRATORIO.




9
VERIFICARE PERIODICAMENTE LE CONDIZIONI DELLE BATTERIE INTERNE E/O ESTERNE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DELLA CORRENTE.

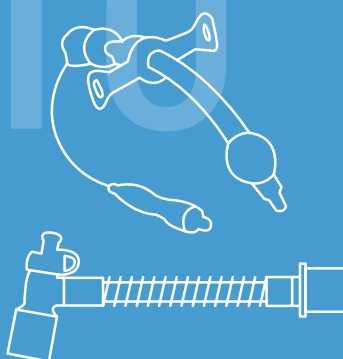

10
UTILIZZARE SOLO GLI ACCESSORI PRESCRITTI DAL MEDICO.

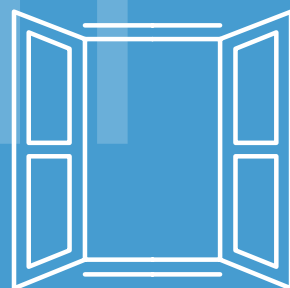


11
NEL CASO SIA PRESCRITTA ANCHE L'OSSIGENOTERAPIA, ATTENERSI ALLE PROCEDURE E, PER PRECAUZIONE, ARIEGGIARE LA STANZA PER EVITARE LA SOVRAOSSIGENAZIONE.

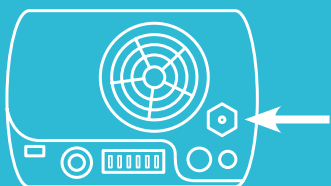

12
NEL CASO DI OSSIGENO IN INGRESSO AL VENTILATORE, ACCERTARSI CHE NON SIA UMIDIFICATO.



13
VITALAIRE ASSICURERÀ LA REVISIONE DELL'APPARECCHIATURA DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO, GARANTENDONE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.

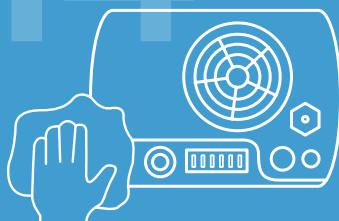

14
PER LA PULIZIA ESTERNA DEL VENTILATORE UTILIZZARE PANNO UMIDO E DETERGENTE DELICATO. NON UTILIZZARE MAI PRODOTTI ABRASIVI.



15
NON CERCARE MAI DI RISOLVERE UN GUASTO SENZA L'INDICAZIONE ESPLICITA DELL'ADDETTO DELL'ASSISTENZA.



16
VITALAIRE GARANTISCE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DISPONIBILE 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI INCLUSI I FESTIVI AL NUMERO VERDE

Numero Verde
800-863062



Ventiloterapia | Ossigenoterapia | Apnee del sonno
Cure Domiciliari | Telemedicina | Comunicatori oculari

* Cambiare l'assistenza. Insieme a voi.

Contatti

VITALAIRE ITALIA S.p.A. - MEDICASA ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
Tel. +39 0240211 - Fax +39 024021.806



Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l'industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d'igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure dall'ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.